

Worek rozpuszczalny 35l (66x84cm)

Worek rozpuszczalny w wodzie do izolowania, transportu, dezynfekcji i prania bielizny zainfekowanej i skażonej.


Do produkcji worka rozpuszczalnego użyto **poliakoholu winylowego** wysokiej jakości. Worek zaopatrzony jest w pasek do zamykania, **rozpuszczalny w zimnej wodzie**, co pozwala na jego otwarcie już w fazie początkowej prania, która jest absolutnie konieczna do usunięcia plam z krwi.

Nieprzepuszczalny, nie pozwala na wydostanie się bakterii. **Całkowicie rozpuszcza się w ciepłej wodzie (60°C)**. Nie pozostawia żadnych resztek, osadów, nie zapycha (nie zatyka) filtra pralnicy. Rozmiar worka 66x84 cm.

UŻYWAĆ NA PODSTAWIE PONIŻSZEJ INSTRUKCJI:



1. Napełnić worek bielizną zainfekowaną lub skażoną.

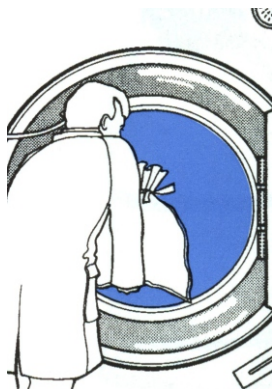

2. Umieścić worek w pralnicy.



3. W początkowej fazie rozpuszcza się pasek (w zimnej wodzie). W kolejnych cyklach prania worek rozpuszcza się całkowicie.



4. Bielizna prana jest normalnie bez żadnych zmian.

ZASADY POSTĘPOWANIA I PRZECHOWYWANIA dot. WORKA ROZPUSZCZALNEGO

- ▶ Napełnić worek unikając bezpośredniego kontaktu mokrego prania ze ściankami worka.
- ▶ Worek posiada pasek do zamykania rozpuszczalny w zimnej wodzie co pozwala na wydostanie się bielizny i pranie jej w zimnej wodzie (np. pranie plam z krwi).
- ▶ Nie wiązać worka za pomocą supeł, ponieważ supeł rozpuszcza się zbyt długo, co mogłoby uniemożliwić pranie w zimnej wodzie.
- ▶ Worek wkładać bezpośrednio do pralki.
- ▶ Wykonywać pranie wstępne oraz moczenie tylko w wodzie bez detergentów.
- ▶ Pozwolić aby woda osiągnęła temp. 60°C, a następnie dodać detergentu (detergent rozpuścić w wodzie przed dodaniem go do prania).
- ▶ Unikać bezpośredniego wtrysku czystych detergentów lub sody kaustycznej na części worka, ponieważ mogą stać się nierozpuszczalne.
- ▶ Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, z dala od otwartych lub silnych źródeł ciepła, w temperaturze od 18 do 25 °C. (min. Temp. 10 °C).
- ▶ Unikać przypadkowego kontaktu z wodą - produkt rozpuszczalny w wodzie.
- ▶ Nie wypełniać pralnicy ponad normę .
- ▶ Miejsce przechowywania: Zalecany neutralny obieg powietrza. Worki powinny być użyte do 6 miesięcy od daty zakupu.
- ▶ W przypadku kontaktu ze skórą - zmyć dużą ilością wody z mydłem, z gałkami ocznymi – splukać obficie wodą, w przypadku połknięcia wywołać wymioty.
- ▶ Worki zaczynają się rozwarstwiać od 35°C do 40°C, rozpuszczają się całkowicie od 65°C do 75°C. Nie pozostawiają żadnych resztek w wodzie oraz nie zamieniają się w żadną ciecz przypominającą żelatynę.